



عنوان:

### چک لیست نگهداری پیشگیرانه دستگاه الکترو کوتر ویژه کاربران

تاریخ بازنگری: ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

تاریخ ابلاغ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۱

شماره اموال	عنوان بازدید پیشگیرانه																					
	دوره زمانی (هر روز یا قبل از هر بیمار جدید)																					
اقدام مداخله ای در صورت نیاز																					تاریخ بازدید	
																						بدنه دستگاه تمیز می باشد و اثر آسیب روی دستگاه یا نشست مایعات دیده نمی شود
																						کلیه اتصالات و کابلها و فیش ها سالم می باشد و به درستی در محل خود قرار دارد
																						نمایشگرها شامل صفحه نمایش و چراغ ها سالم می باشد
																						محل قرارگیری دستگاه مناسب می باشد و وضعیت توالی دستگاه از لحاظ بدنه و قفل چرخ ها مناسب میباشد
																						پریز مربوط به اتصال به کابل دستگاه ارت دار میباشد
																						تاریخ کنترل کیفی دستگاه معتبر می باشد
																						بررسی آلارم های دیداری و شنیداری دستگاه
																						عملکرد پلیت بیمار مناسب می باشد و در هنگام اتصال پلیت نشانگر مربوطه فعال می شود در صورت استفاده از پلیت دو تکه جهت تست دو تکه پلیت را بهم متصل نمائید.
																						عملکرد موتوپولار مناسب می باشد و با اتصال قلم به دستگاه فعال می شود (تست بر روی پارچه مرطوب)
																						عملکرد پایبولار مناسب می باشد و با اتصال قلم به دستگاه فعال می شود (تست با چسباندن دو لبه قلم پایبولار به یکدیگر یا چسباندن دو لبه به گاز خیس)
																						پدال پایی دستگاه به دستگاه متصل است و با فشردن شدن فعال می شود
																						بررسی عملکرد تست خودکار دستگاه (در صورت موجود بودن روی دستگاه)

نام و نام خانوادگی کاربر هر روز										
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	
۱۰	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	
۲۰	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	

مهر و امضاء مسئول بخش