

هشدار /پیغام/ کد	اعلان دستگاه	علت هشدار	اقدام استفاده کننده(کاربر)	عکس العمل دستگاه
هشدار های کنترلر سطح بالا (TLC)				
بیمار به دستگاه متصل شده؟ کد (1824)	هشدار صوتی نور قرمز	اولین دفعه مشاهده خون در طول درمان	دو دفعه کلید Aq را فشار دهید نحوه اتصال بیمار به دستگاه را بررسی نمایید که صحیح باشد بررسی نمایید که دستگاه در "وضعیت درمان" باشد	پیغام هشدار به کنترلر سطح بالا ارسال میگردد پمپ خون متوقف میگردد
خطا: حجم اولترا فیلتریشن بالا توقف دیالیز (کد 1826)	هشدار صوتی نور قرمز	عدم انطباق حجم UF بیش از 400ML	پایان دادن درمان تماس با واحد فنی	پیغام هشدار به TLC ارسال شد توقف تزریق هیپارین
سرنگ هیپارین آشکار نشد (کد 1827)	هشدار صوتی(در آماده سازی) نور قرمز(در آماده سازی) هشدار صوتی(در درمان) نور قرمز(در درمان)	قطر سرنگ >15mm	نوع سرنگ هیپارین را بررسی نمایید موقعیت سرنگ را بررسی نمایید	پیغام هشدار به TLC ارسال شد توقف تزریق هیپارین
نسبت ناخالص جریان UF به جریان خون بالا، یا جریان خون خیلی پائین (کد 2059)	هشدار صوتی چراغ قرمز	نرخ UF از درصد مشخصی از نرخ جریان خون بالاتر رفته	دو دفعه کلید Aq را فشار دهید حجم UF را کاهش دهید سرعت پمپ خون را افزایش دهید زمان درمان را افزایش دهید	پیغام هشدار به TLC ارسال گردید وضعیت بای پس
اخطار های کنترلر سطح بالا (TLC)				
زمان (دوره زمانی) انتخاب شده پایان یافته (کد 1900)	سیگنال صوتی نور زرد	زمان (هر) پروفایل به انتها رسیده است	دوره زمانی متفاوتی را انتخاب نمایید	پیغام اخطار به TLC ارسال شد
هشدار شماره 1901 (کد 1901)	چراغ زرد	نرخ UF تعیین شده در ویرایشگر پروفایل UF، کمتر از حد پایین مطلق یا الزام حداقل نرخ آگیری (UF) است	نرخ آگیری (UF) را افزایش دهید	پیغام هشدار به TLC ارسال گردید - حجم آگیری (UF) مورد نیاز تعیین شده، رد شد (تأیید نشد)
هشدار شماره 1902 (کد 1902)	چراغ زرد	نرخ UF تعیین (تنظیم) شده در ویرایشگر پروفایل UF، کمتر از حد پایین مطلق یا الزام حداقل نرخ آگیری (UF) است	نرخ آگیری (UF) را افزایش دهید	پیغام هشدار به TLC ارسال گردید - حجم آگیری (UF) مورد نیاز تعیین شده، رد شد (تأیید نشد)
حجم آگیری (UF) انتخاب شده خیلی زیاد است	سیگنال صوتی چراغ زرد	حجم آگیری (UF) مورد نیاز تعیین (تنظیم) شده از میزان قابل آگیری بیشتر است.	حجم آگیری (UF) را کاهش دهید	پیغام هشدار به TLC ارسال گردید حجم آگیری (UF) مورد نیاز تعیین شده، رد شد